

### EcoSapiens ARTMASSAGE – искусство массажа!

После сеанса массажа улучшается не только физическое, но и духовное состояние человека. Восстанавливается энергетический баланс, поднимается настроение, улучшается сон и повышается жизненный потенциал. Массаж – это тонкое искусство, в котором важна каждая деталь!

Одна из таких деталей - массажный стол ARTMASSAGE!

Мощный деревянный корпус обеспечит надежность, благородные цвета обивки произведут неизгладимое впечатление, дополнительные опции добавляют комфорт Вашим клиентам, а работа за таким столом доставит истинное удовольствие Вам!



#### Стол «ARTMASSAGE» подходит для:

- всех видов массажа;
- акупунктуры;
- эстетической медицины;
- лимфодренажа;
- физиотерапии;
- рефлексотерапии;

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Максимальная нагрузка          | 300 кг   |
| Материал основания             | Мощный каркас из прочного бука;<br>Усиленная рама стола;<br>Эластичный газонаполненный пластик на основе; полиуретана.         |
| Отделка                        | Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа;<br>Округленные борта;   |
| Габариты<br>(без подголовника) | 70*195 см  |
| Конструкция                    | Трехсекционная эргономическая;<br>Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания; |
| Регулирование высоты           | 59-84 см   |
| Вес                            | 17,4 кг  |
| Дополнительные опции           | Съемный подголовник;<br>Съемные подлокотники;  |

Благодарим Вас за приобретение портативного массажного стола EcoSapiens!

#### Важные предупреждения:


Неправильная установка, использование и уход за массажным столом может стать причиной физической травмы. Во избежание травм внимательно прочтите данную инструкцию и следуйте ей во время сборки и использования стола.

- Не используйте стол, если он был неправильно собран, а также в случае потери, отсутствия или порчи компонентов сборки.
- Храните и эксплуатируйте стол в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +27°C.
- После сборки изделия, обязательно убедитесь, что конструкция твердо стоит на поверхности.
- Высота всех четырех ножек должна быть установлена на одинаковом уровне.
- Перемещать изделие без разборки можно только на расстояние не более 2-х метров. При этом необходимо взять стол за ножки и приподнять над поверхностью пола.
- Собирать и устанавливать массажный стол необходимо силами не менее двух человек.
- Запрещено садиться и ставить тяжелые вещи на регулируемую секцию спины, подлокотники и подголовник (для тех моделей, где присутствуют данные опции).
- Используйте массажный стол только по назначению.
- Не используйте массажный стол в случае обнаружения неисправных компонентов во время сборки или эксплуатации. Также прекратите использование, в случае возникновения шумов или скрипа.
- В случае обнаружения неисправных компонентов, не пытайтесь произвести замену самостоятельно, а обратитесь к специалисту в центр сервисного обслуживания.
- Не становитесь на стол ногами или коленями.

#### Для сохранения материала покрытия в рабочем состоянии и максимального продления его срока службы, выполняйте следующие требования:

- Во время эксплуатации, покрывайте массажный стол специально предназначенной защитной тканью (не входит в комплектацию). Маслосодержащие препараты могут оказывать нежелательное агрессивное воздействие на материал покрытия стола и привести к его преждевременному износу.
- Очищайте материал покрытия после каждого применения. Для этого используйте мягкодействующие моющие средства (небольшое количество антибактериального мыла смешайте с водой). Нанесите моющее средство при помощи распылителя и удалите чистой водой при помощи мягкой тряпки. Протрите материал поверхности насухо.
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, т.к. через некоторое время это может привести к растрескиванию и отслаиванию верхних слоев материала.

Названия элементов массажного стола:

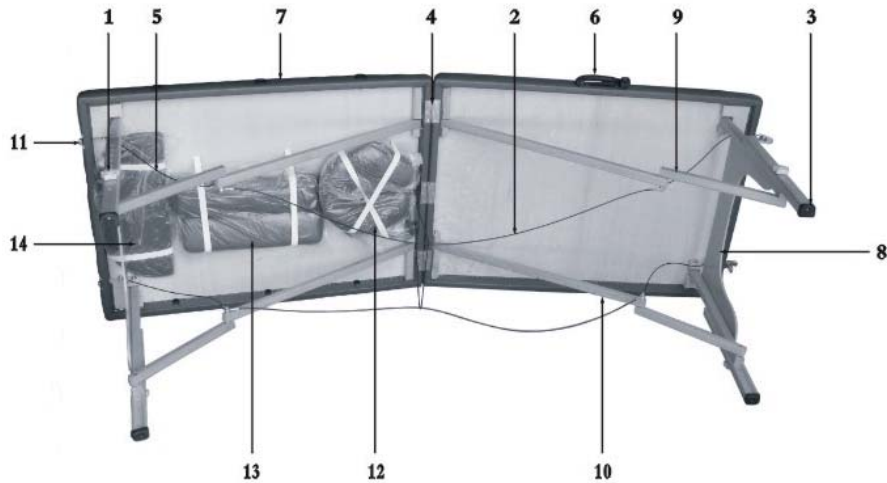


| Номер | Описание                                    | Количество |
|-------|---|------------|
| 1     | Ножка стола                                 | 8          |
| 2     | Длинный кабель                              | 2          |
| 3     | Защитная заглушка                           | 12         |
| 4     | Соединительная петля                        | 3          |
| 5     | Короткий кабель                             | 4          |
| 6     | Ручка для переноски                         | 1          |
| 7     | Обивка массажного стола из медицинской кожи | 2          |
| 8     | Распорка                                    | 2          |
| 9     | Распорка                                    | 4          |
| 10    | Распорка                                    | 4          |
| 11    | Скоба замка                                 | 2          |
| 12    | Подголовник                                 | 1          |
| 13    | Подлокотник                                 | 1          |
| 14    | Подстилка для процедур                      | 1          |

**EcoSapiens PROFI – идеальный массажный стол!**

Может ли один складной массажный стол сочетать в себе такие параметры как высокое качество, надежность, функциональность, красота?

Может, если речь идет о массажном столе PROFI!

Каркас конструкции выполнен из натурального дерева, тщательно отобранного и обработанного в процессе производства. Трехсекционная эргономическая конструкция позволяет с легкостью менять положение пациента во время сеанса массажа. Съемный подголовник и подлокотники дополняют, а гармоничная форма конструкции и ультрамодное сочетание цветов завершают образ идеального массажного стола!

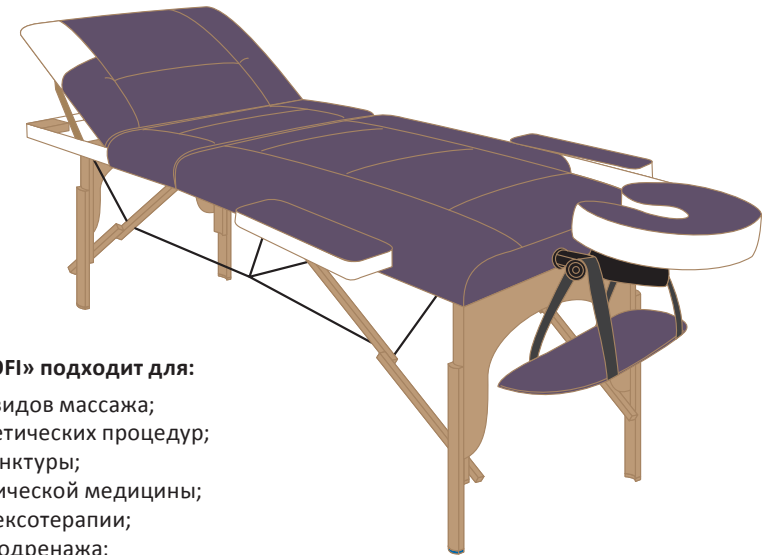**Стол «PROFI» подходит для:**

- всех видов массажа;
- косметических процедур;
- акупунктуры;
- эстетической медицины;
- рефлексотерапии;
- лимфодренажа;

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Максимальная нагрузка       | 300 кг   |
| Материал основания          | Мощный каркас из прочного бука;<br>Усиленная рама стола;<br>Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана;          |
| Отделка                     | Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа;<br>Скругленные борта;   |
| Габариты (без подголовника) | 70*195 см  |
| Конструкция                 | Трехсекционная эргономическая;<br>Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания. |
| Регулирование высоты        | 59-84 см   |
| Вес                         | 17,4 кг  |
| Дополнительные опции        | Съемный подголовник;<br>Съемные подлокотники;  |

### EcoSapiens Ultra Light - самый легкий стол коллекции Duo!

Компания EcoSapiens позаботилась о мастерах, которые часто выезжают на дом к своим клиентам и создала облегченную модель массажного стола Ultra Light. Вес этой модели всего 10,5 кг и справиться с ней смогут даже самые миниатюрные мастера.

Достичь такого легкого веса удалось при помощи алюминиевой конструкции корпуса, а также за счет отказа от подлокотников, но при этом удалось сохранить такие параметры как прочность, функциональность и высокое качество стола.

Основание стола – это надежные алюминиевые трубки, собранные в единый прочный каркас, с дополнительным усилением на раму. Обивка столешницы выполнена из воздухопроницаемой медицинской кожи, абсолютно гипоаллергенной и простой в уходе. Насыщенная сине-белая цветовая гамма обивки задает этой модели спортивный характер, который дополняет совершенная форма и повседневная практичность.



#### Стол «Ultra Light» подходит для:

- всех видов массажа;
- косметических процедур;
- акупунктуры;
- рефлексотерапии;
- физиотерапии;

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Максимальная нагрузка       | 250 кг  |
| Материал основания          | Легкая алюминиевая подвеска;<br>Усиленная рама стола обеспечивает еще большую устойчивость и долговечность;<br>Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана |
| Отделка                     | Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа;<br>Округленные борта;  |
| Габариты (без подголовника) | 63*186 см   |
| Конструкция                 | Двухсекционная эргономическая;<br>Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания;  |
| Регулирование высоты        | 63-91 см  |
| Вес                         | 10,5 кг   |
| Дополнительные опции        | Съемный подголовник   |

#### Установка массажного стола:



1-1. Снимите фиксирующую скобу.



1-2. Положите массажный стол боком и раскройте его.



2. Разложите ножки (При раскрывании стола нижняя половина ножки занимает правильное положение).



3. Зафиксируйте каждую распорку.



4. Поднимите стол и поставьте его на ножки на пол.



5-1. Откройте подголовник.




5-2. Поместите направляющие подголовника в отверстия, положите на подголовник подушку.



5-3. Вытащите ручку, отрегулируйте высоту и угол подголовника, а затем защелкните ручку обратно.

#### Сборка и транспортировка:

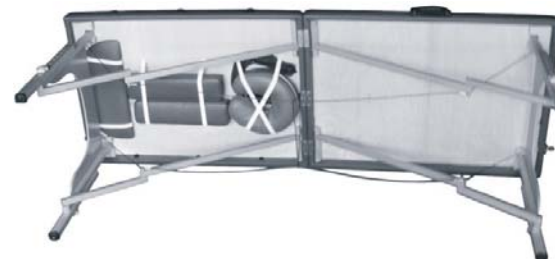

1. Положите массажный стол набор и собирайте в таком положении.
2. Полностью соберите подставку для ног в верхней части стола.
3. Сложите стол пополам и зафиксируйте замок на столе.

**EcoSapiens Wellness - невероятная гармония качества и практичности!**

Каркас стола создан из натурального дерева. В процессе производства деревянное основание каждого стола тщательно обрабатывается и проверяется на прочность путем нескольких этапов испытательных тестов. Специальная конструкция тросов обеспечивает дополнительную устойчивость и предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания стола.

Обивка стола Wellness выполнена из воздухопроницаемой, высококачественной медицинской кожи, цветовое решение которой, добавляет столу еще большую практичность во время использования.



**Стол «Wellness» подходит для:**

- всех видов массажа;
- акупунктуры;
- косметических процедур;
- лимфодренажа;
- рефлексотерапии;

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Максимальная нагрузка       | 250 кг   |
| Материал основания          | Прочный каркас из бука;<br>Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана;   |
| Отделка                     | Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа;<br>Скругленные борта;   |
| Габариты (без подголовника) | 63*186 см  |
| Конструкция                 | Двухсекционная эргономическая;<br>Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания; |
| Регулирование высоты        | 59-82 см   |
| Вес                         | 12,5 кг  |
| Дополнительные опции        | Съемный подголовник;<br>Съемные подлокотники;  |

**EcoSapiens Energy – самый яркий массажный стол коллекции Duo!**

Стол Energy полностью оправдывает свое название за счет стильной и жизнеутверждающей цветовой гаммы обивки, которая добавит солнечный свет и позитивную энергию в любой интерьер.

Материал обивки традиционно выполнен из прочной, воздухопроницаемой медицинской кожи, качество которой одобрено профессиональными мастерами массажа по всему миру.

Дополнительным достоинством стола является трубчатый каркас, выполненный из стали с анти-коррозийным напылением, которое защищает конструкцию от образования ржавчины.



**Стол «Energy» подходит для:**

- всех видов массажа;
- акупунктурного массажа;
- мануальной терапии;
- SPA-процедур;
- лимфодренажа;
- рефлексотерапии;

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Максимальная нагрузка       | 250 кг   |
| Материал основания          | Высокопрочная стальная подвеска из трубчатых рам;<br>Прочный деревянный каркас;<br>Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана; |
| Отделка                     | Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа;<br>Округленные борта;   |
| Габариты (без подголовника) | 70*195 см  |
| Конструкция                 | Двухсекционная эргономическая;<br>Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания;               |
| Регулирование высоты        | 62-88 см   |
| Вес                         | 17 кг  |
| Дополнительные опции        | Съемный подголовник;<br>Съемные подлокотники;  |